


組み立てガイド Starter Guide

こちらのガイドは、製品組み立てについて記載しております。
画面操作については別紙の取扱説明書をご確認ください。

① 内容物を確認する

二つの箱に、下記の同梱物があることを確認してから組み立てを行ってください。
組み立て・設置はお一人でも可能ですが、二人以上で行っていただくと、より安全に作業いただけます。

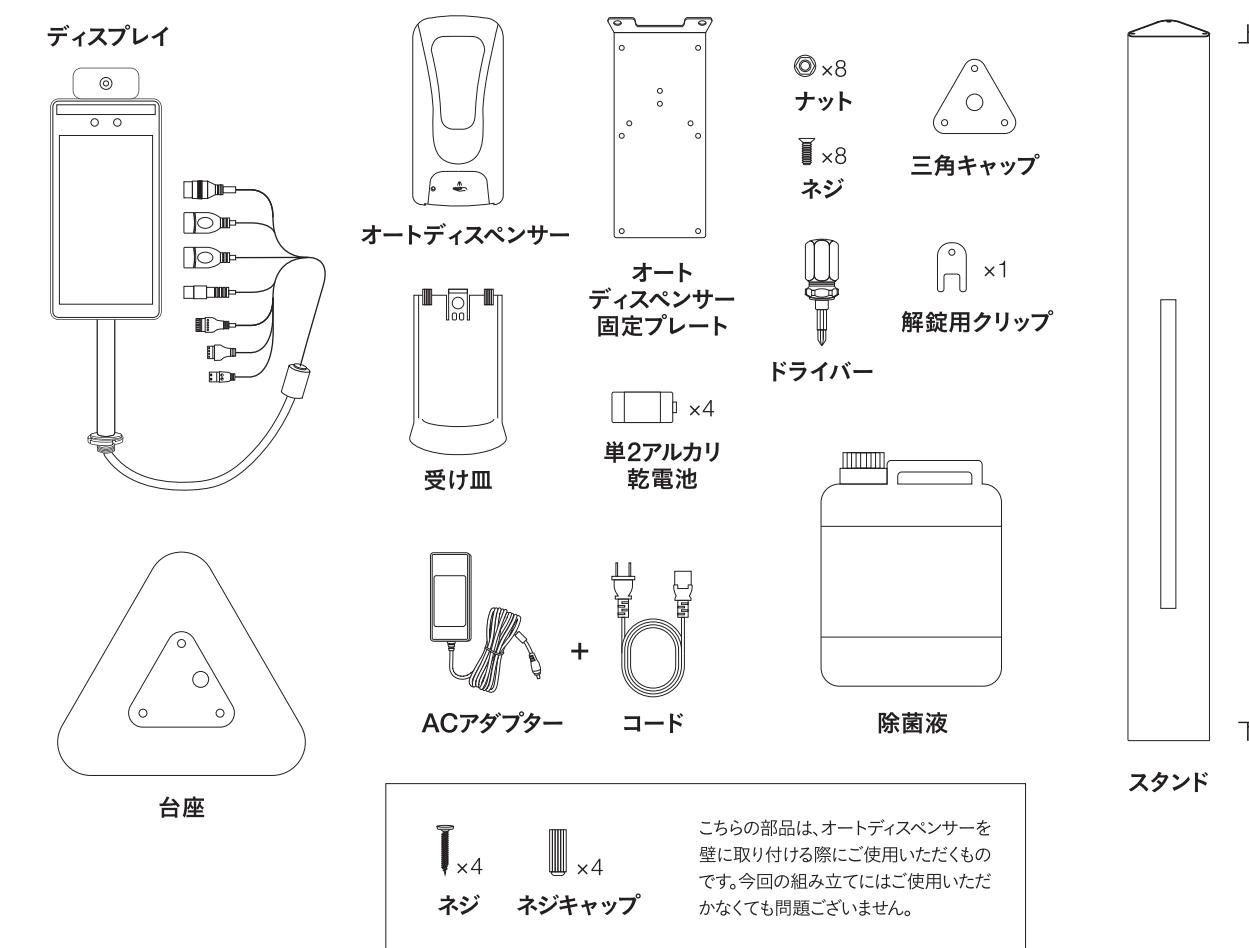


※ 在庫状況により部品の形状が説明書の図と異なる場合がありますが、組み立て・品質に影響はございません。

作業時間
15分
程度

※作業に不慣れな場合、30分以上かかる場合がございます。


② 製品を組み立てる

1 台座を固定する

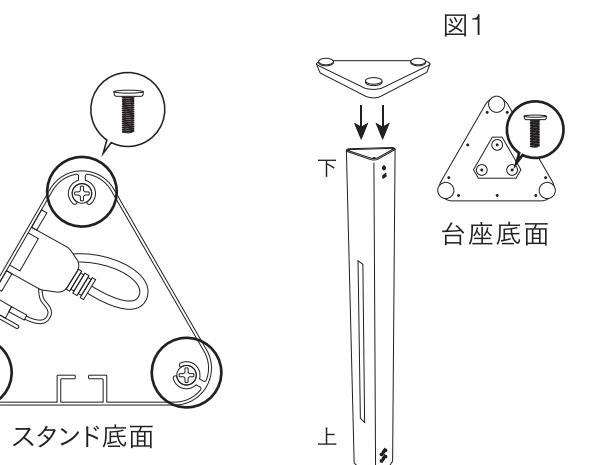


①スタンドを上下逆にして、底面の裏側についているネジを、ドライバーを使用して取り外します。
②「図1」を参考に、①で外したネジを使ってスタンド底面に台座を固定してください。
※無理に引っ張らないでください。断線の原因となります。
③三角キャップ裏面のプレートがはずれないように、三角キャップにしっかりと固定してください。ネジが緩い状態で設置すると、スタンドが倒れる恐れがあります。

2 スタンド内部のコードを取り出す

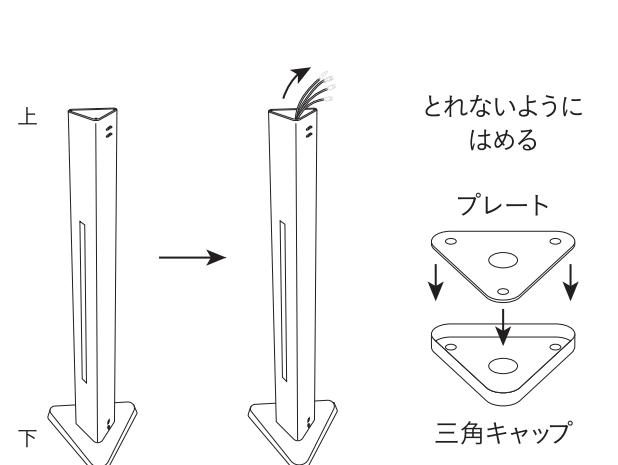


①スタンドの上部に固定してあるネジを緩めて、取り外します。
②スタンドの内部に入っているコード類を、ゆっくり引き出してください。
※コードを引く際は、絡まないように注意してスタンド内部に収納してください。
③三角キャップ裏面のプレートがはずれないように、三角キャップにしっかりと固定してください。

3 固定スリーブを取り外す

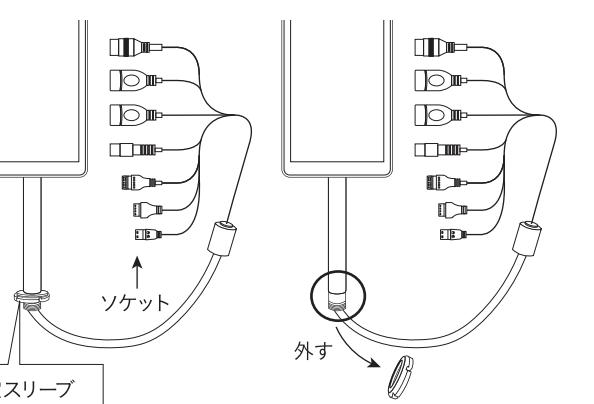


①ディスプレイのボルト部分にある、固定スリーブを回して緩めます。
②スリーブを図のようにディスプレイのコードから完全に引き抜いてください。
※無理にスリーブを引き抜かないでください。断線の恐れがあります。外す際はスリーブの穴にソケットのコードを一つずつ通して引き抜いてください。

4 ディスプレイコードを通す

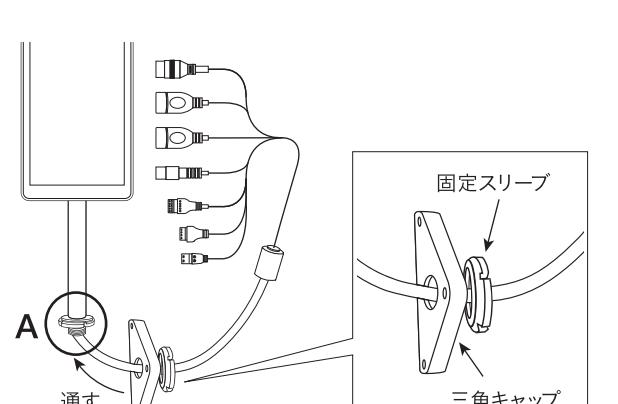

①ディスプレイのコードに、三角キャップを通してください。
②同じ手順でスリーブをコードに通してください。
③図のAの位置にキャップとスリーブを移動した後、スリーブを回し、緩まないようにしっかりと締めてください。
※三角キャップの穴に一つずつコードを通してください。無理に通すと固定スリーブ同様、断線の恐れがあります。


5 各ソケットをつなぐ

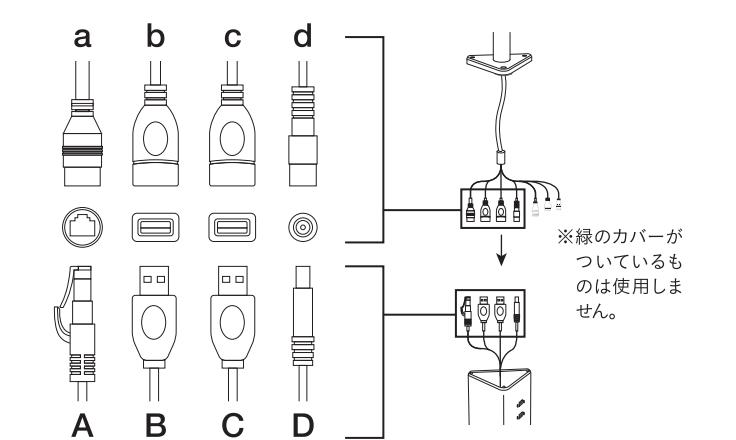

①ディスプレイ側のソケットを、スタンド内部のコードとつなげてください。(添付写真的アルファベット対応順)
②取り外したスタンド上部のネジをキャップのネジ穴にはめ、ドライバーを使用して締めてください。
※スタンド上部の三角形の形状と、キャップの向きが合っているのかを確認してネジを締めてください。形状が合わないまま無理に固定すると、破損する恐れがあります。


6 三角キャップをはめる

※オートディスペンサーを取り付ける場合は、キャップをはめた後、裏面の『③消毒機「オートディスペンサー」を取り付ける』の①～④の作業を行ってください。

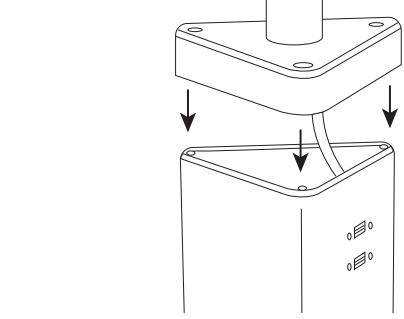


①コードをスタンドに収納し、ディスプレイとスタンドを合体してください。
②②で取り外したスタンド上部のネジをキャップのネジ穴にはめ、ドライバーを使用して締めてください。
※スタンド上部の三角形の形状と、キャップの向きが合っているのかを確認してネジを締めてください。形状が合わないまま無理に固定すると、破損する恐れがあります。

7 コンセントに接続する

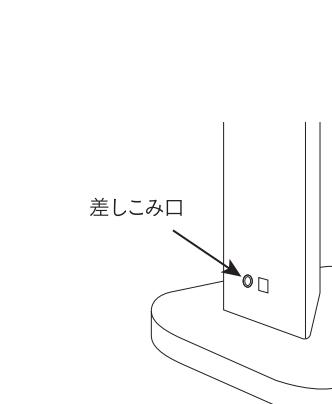

①コードとACアダプターをつなげます。
②スタンド下部にある差しこみ口にACアダプターのプラグを挿入し、コードの先端をコンセントに接続してください。
③しばらくすると、スタンド中央のライトが青く光り、製品が起動します。

■ディスプレイ角度の調整

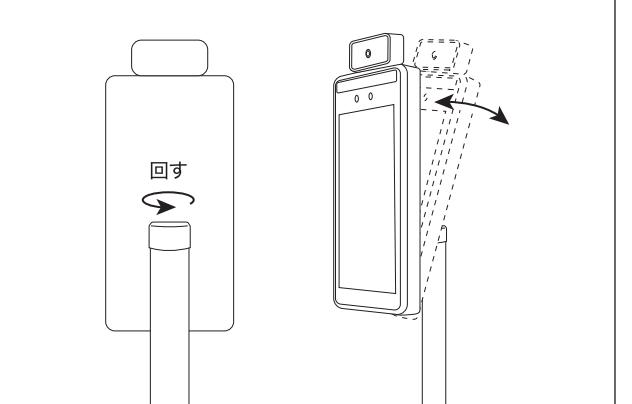


ディスプレイの後ろにあるキャップを緩め、ディスプレイを前後に動かすことでき角度を調整いただけます。
※キャップを緩めすぎないようにしてください。ディスプレイの取り付け部分が外れて落下する恐れがあります。


③消毒機「オートディスペンサー」を取り付ける

付属の消毒機「オートディスペンサー」を取り付けていただくことで、より衛生的、効果的にサーモエントランスをご使用いただけます。

■オートディスペンサー各部の名称

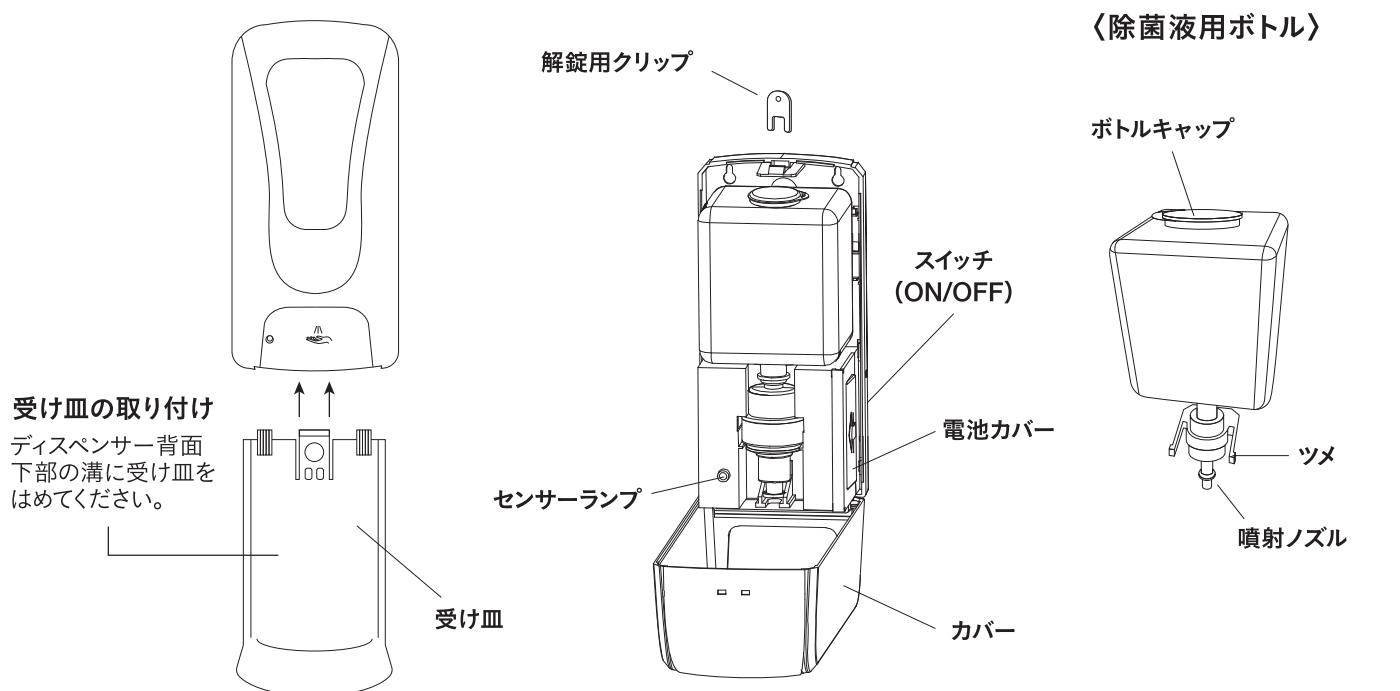


■カバーの開け方

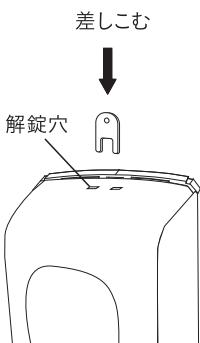


- ①ディスペンサーの解錠穴に解錠用クリップを差しこみ、矢印の方向に押してください。
- ②ロックが解除されますので、外側のカバーを開いてください。
- *クリップは、なくさないようにお手元に大切に保管してください。

■乾電池を使用する場合

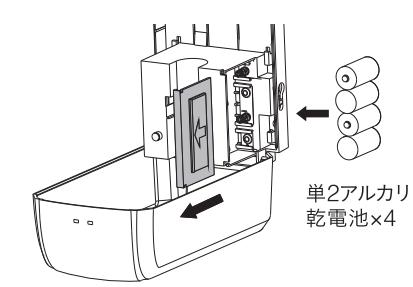


- ①ディスペンサーのカバーを開きます。
- ②図のように本体側面にある電池カバーを矢印の方向にスライドし、付属の単2アルカリ乾電池を入れてからご使用ください。

■除菌液の入れ方

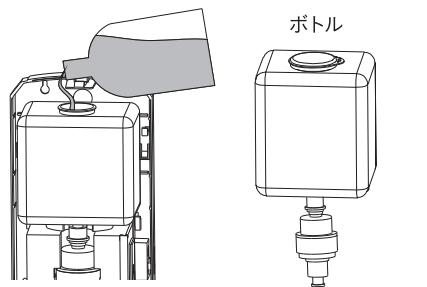


- ①ディスペンサーのボトルキャップを開け、液が漏れないように注いでください。

1 除菌液用ボトルを取り外す

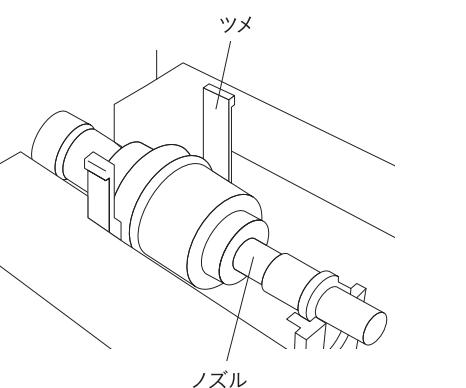


- ①ディスペンサーに付属の「解錠用クリップ」を使用し、■カバーの開け方を参考に、外側のカバーを開きます。
- ②ツメ2ヶ所の根本をしっかりと親指と人差し指で挟みます。もう片方の手をノズルの裏側にひっかけて上に引き上げ、ボトルを取り外します。

2 ディスペンサー固定プレートを取り付ける

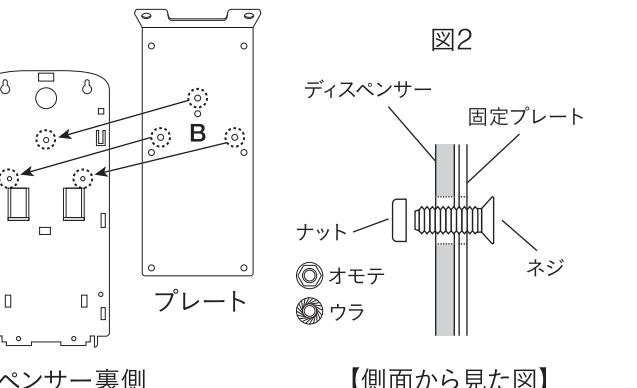

- ①ディスペンサーの裏側にディスペンサー固定プレートを取り付けます。
- ②枠内Bの3ヶ所にネジをはめて図2を参考に裏側からナットで固定します。
- ③ナットをつまんでおさえて、ネジをドライバーを使用して固定します。

3 除菌液用ボトルと受け皿を取り付ける

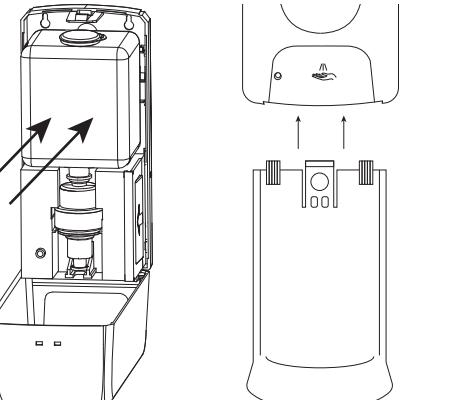

- ①ボトルのツメが手前側、ノズルを下側にした状態でボトルを再びディスペンサーに収納します。
- ②カバーを元に戻します。
- ③『■乾電池を使用する場合』を参考に、乾電池をディスペンサーにセットします。
- ④ディスペンサー側面にある電源スイッチを入れて、使用してください。

4 完成




■サーモエントランスの使用方法

同梱の取扱説明書をご確認ください。

■オートディスペンサーの使用方法

ご使用の際は、ディスペンサー側面にあるスイッチをONにします。手をかざすとセンサーが反応して、噴射ノズルからアルコールが噴射されます。

センサーランプ
センサー検知可能距離:8~12cm

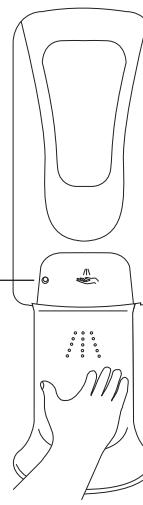

[センサーランプの状態]

- 緑のランプが5秒点滅 → 起動中
- 赤いランプが5秒点滅 → 電力低下・電池交換のサイン
- 赤いランプが2秒点滅 → センサーの下にあるものを取り除いてください。

* 本製品はジェルタイプやソープタイプの消毒液はご利用いただけません。

■使用上の注意点

- ディスペンサー本体を強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損する恐れがあります。
- 直射日光、高温多湿の場所は避けて使用してください。
- 火気・熱源のあるものの近くには設置しないでください。
- 製品に異常が発生した場合はすぐにご使用を中止してください。
- 製品のボトルにはアルコール除菌液以外のものは入れないでください。故障の原因となります。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- 長期間使用しない場合は電源をこまめにお切りください。