

組み立てガイド Starter Guide


こちらのガイドは、製品組み立てについて記載しております。
画面操作については別紙の取扱説明書をご確認ください。

作業時間
15分
程度

※作業に不慣れな場合、30分以上
かかる場合がございます。

① 内容物を確認する


二つの箱に、下記の同梱物があることを確認してから組み立てを行ってください。
組み立て・設置はお一人でも可能ですが、二人以上で行っていただくと、より安全に作業いただけます。

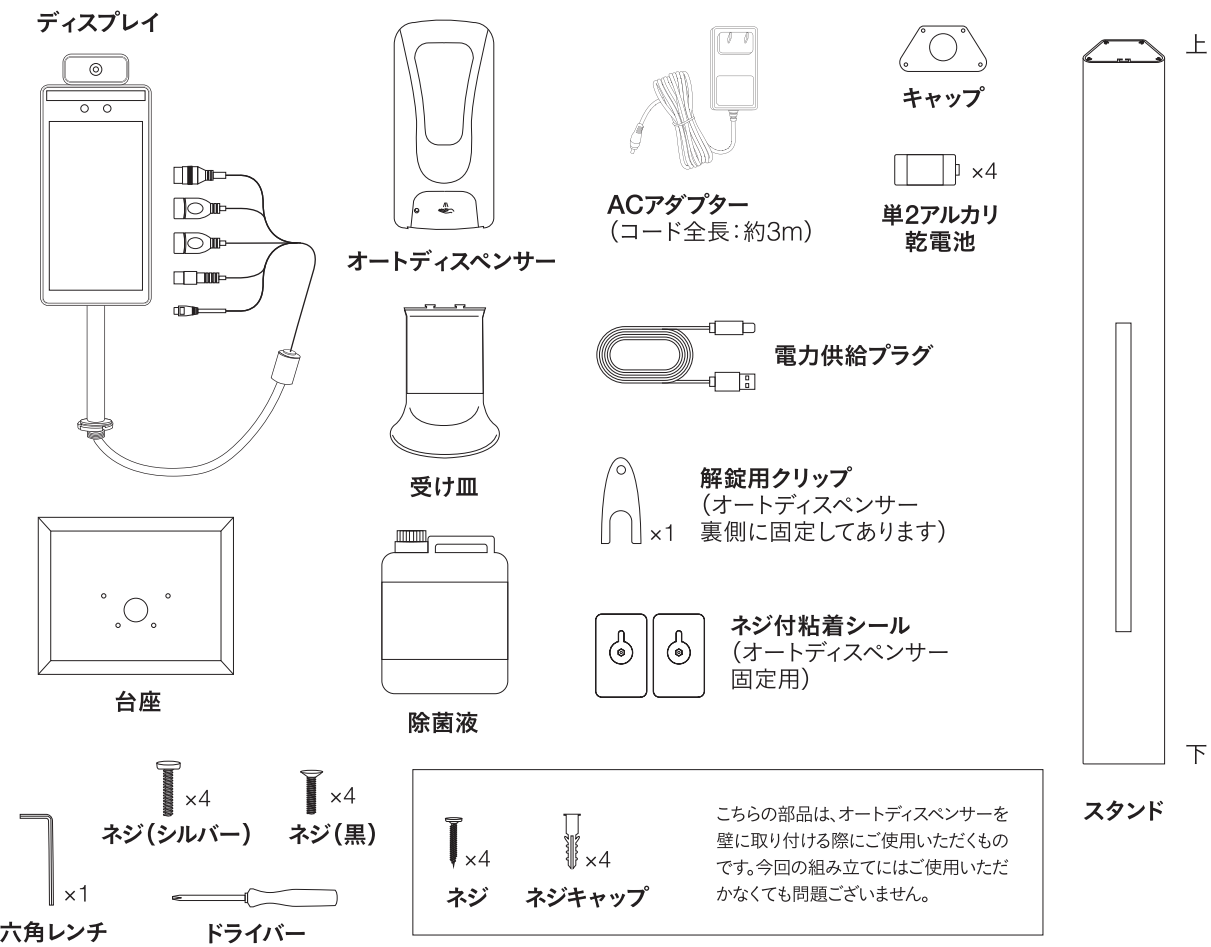

※ 在庫状況により部品の形状が説明書の図と異なる場合がございますが、組み立て・品質に影響はございません。


② 製品を組み立てる

1 台座を固定する

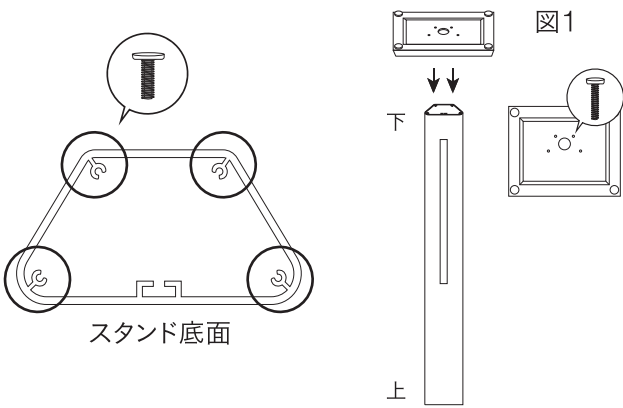


- ①「図1」を参考にスタンドを上下逆にします。
 - ②ネジ(シルバー)とドライバーを使用してスタンド底面に台座を固定してください。
- ※ネジが緩まないように、台座とスタンドを押さえながらしっかりとネジを固定してください。ネジが緩い状態で設置すると、スタンドが倒れる恐れがあります。

2 スタンド内部のコードを取り出す

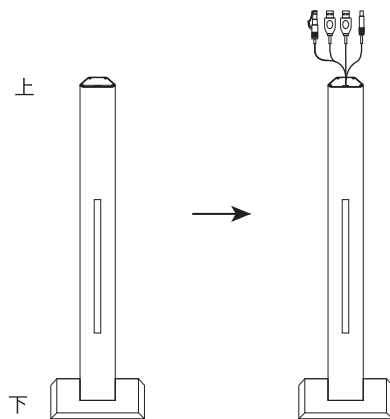


- ①スタンドと土台の向きを元に戻します。
 - ②スタンドの内部に入っているコード類を、ゆっくり引き出してください。
- ※無理に引っ張らないでください。断線の原因となります。

3 固定スリーブを取り外す

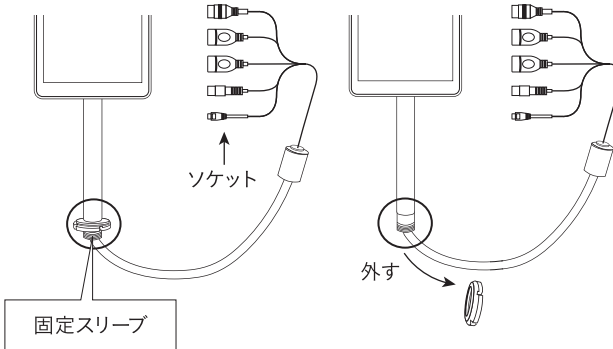


- ①ディスプレイのボール部分にある、固定スリーブを回して緩めます。
 - ②緩めたら、スリーブを図のようにディスプレイのコードから完全に引き抜いてください。
- ※無理にスリーブを引き抜かないでください。断線の恐れがあります。外す際はスリーブの穴にソケットのコードを一つずつ通して引き抜いてください。

4 ディスプレイコードを通す

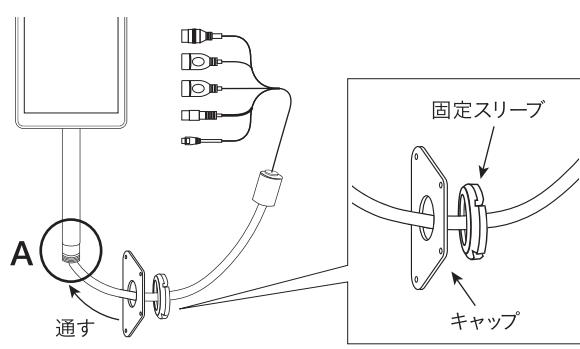


- ①ディスプレイのコードに、キャップを通します。
 - ②同じ手順でスリーブをコードに通してください。
 - ③図のAの位置にキャップとスリーブを移動した後、スリーブを回し、緩まないようにしっかりと締めてください。
- ※キャップの穴に一つずつコードを通してください。無理に通すと固定スリーブ同様、断線の恐れがあります。

5 各ソケットをつなぐ

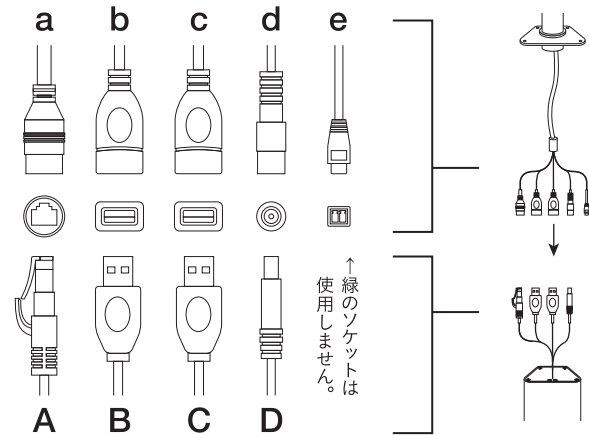


- ①ディスプレイ側のソケットを、スタンド内部のコードとつなげてください。(添付写真のアルファベット対応順)
 - ②接続したコードは、絡まないように注意してスタンド内部に収納してください。
- ※b(黄)・c(白)のソケットはB・Cどちらにつないでいただいても、問題ありません。
- ※コードが絡まる場合は、結束バンドなどでコードをまとめていただくと絡まりにくくなります。

6 キャップをはめる

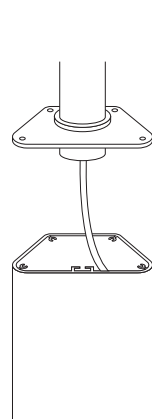


- ①コードをスタンドに収納し、ディスプレイとスタンドを合体してください。
 - ②キャップをスタンドにはめた後、ネジ(黒)をキャップのネジ穴にはめてドライバーで固定します。
- ※スタンドの形状と、キャップの向きが合っているのかを確認してネジを締めてください。形状が合わないまま無理に固定すると、破損する恐れがあります。

7 コンセントに接続する

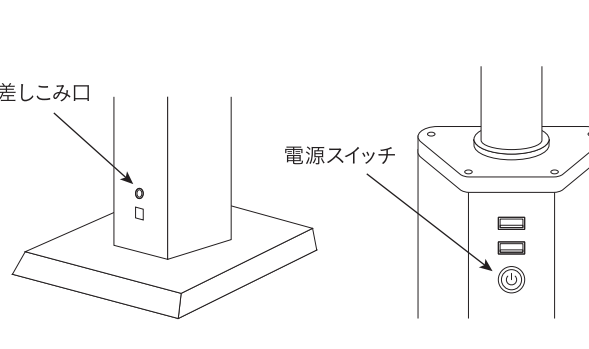

- ①スタンド下部にある差しこみ口にACアダプターのプラグを挿入し、アダプター側をコンセントに接続してください。
- ②スタンド上部にある電源スイッチを押してしばらくすると、スタンド中央のライトが青く光り、製品が起動します。

■ディスプレイ角度の調整

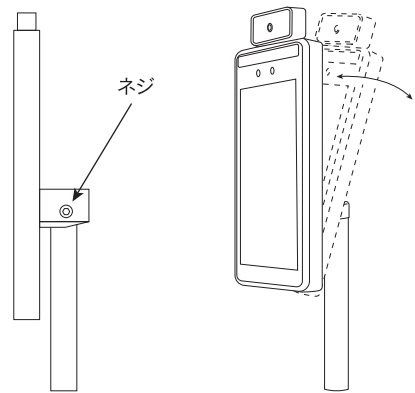


ディスプレイの後ろにあるネジを六角レンチを使用して緩めると、ディスプレイの前後の傾き角度を調整できます。
※調整した後は、ネジをしっかりと締めつけてください。

※ボールを軸として、ディスプレイの回転角度を頻繁に変えると、スリーブが緩んでディスプレイの固定が不安定になるのでご注意ください。


③ 消毒機「オートディスペンサー」を取り付ける

付属の消毒機「オートディスペンサー」を取り付けていただくことで、より衛生的、効果的にサーモエントランスをご使用いただけます。

■オートディスペンサー各部の名称

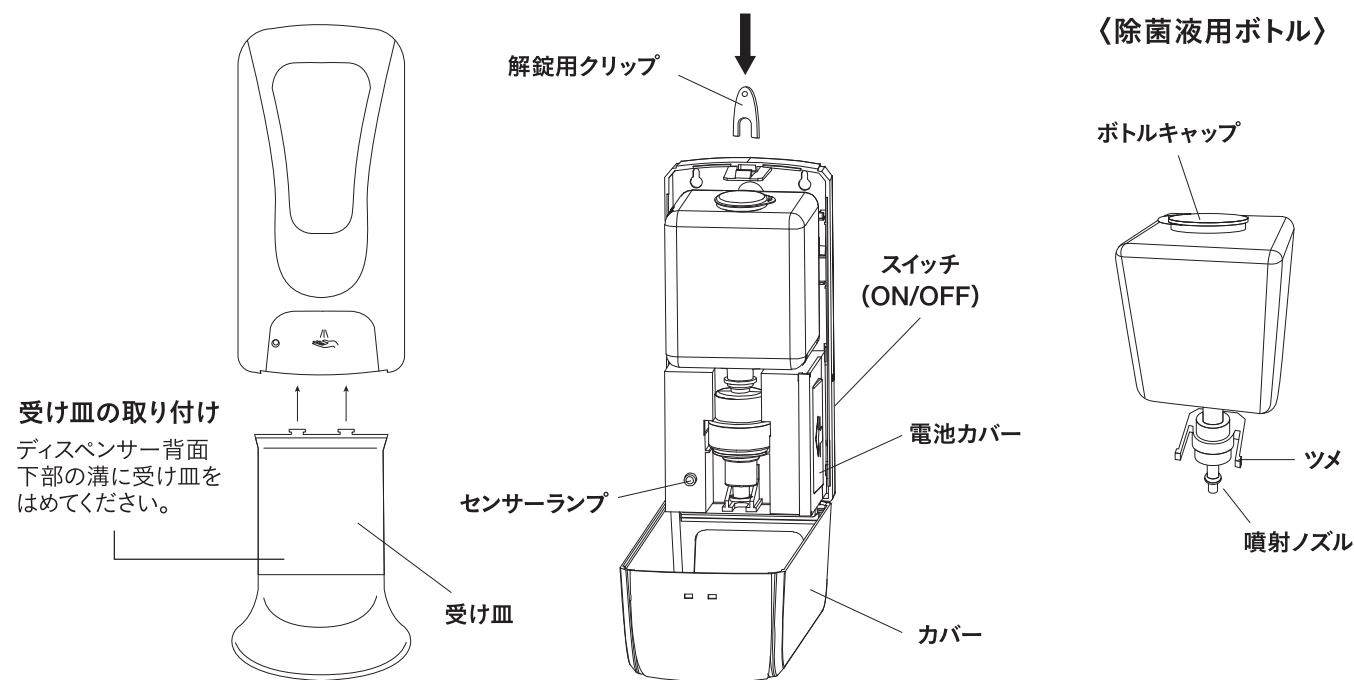


■カバーの開け方

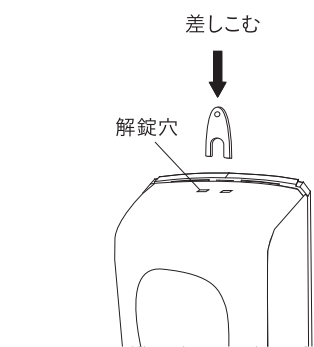

- ①ディスペンサーの解錠穴に解錠用クリップを差しこみ、矢印の方向に押してください。
- ②ロックが解除されますので、外側のカバーを開いてください。

※クリップは、なくさないようにお手元に大切に保管してください。


■乾電池を使用する場合

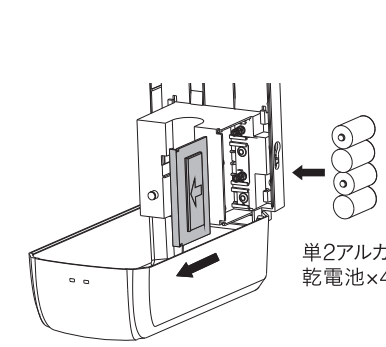

- ①ディスペンサーのカバーを開きます。
- ②図のように本体側面にある電池カバーを矢印の方向にスライドし、付属の単2アルカリ乾電池を入れてからご使用ください。


※乾電池を使用せずに電力供給プラグのみでもご使用は可能です。

■除菌液の入れ方

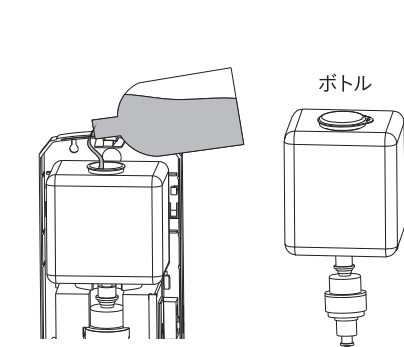


除菌液用ボトルのキャップをあげ、液が漏れないように注いでください。

1 固定用シールを貼る

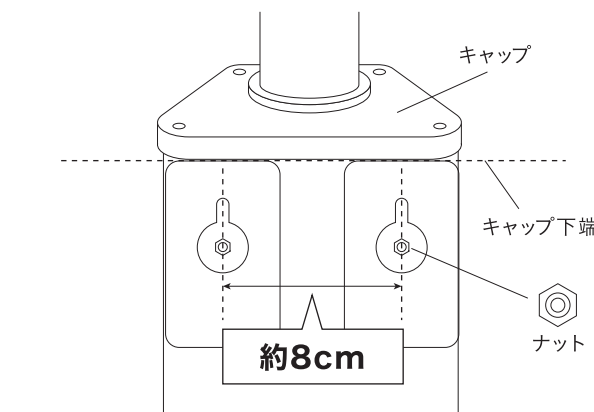

- ①付属の粘着シールネジ部についているナットを外します。
- ②上の図のように、キャップの下端に粘着シールの上端が重なるように位置を合わせます。
- ③2本のネジの中心間が8cmになるように、ゆっくり丁寧に貼ってください。


3 粘着シールのネジを穴にはめる

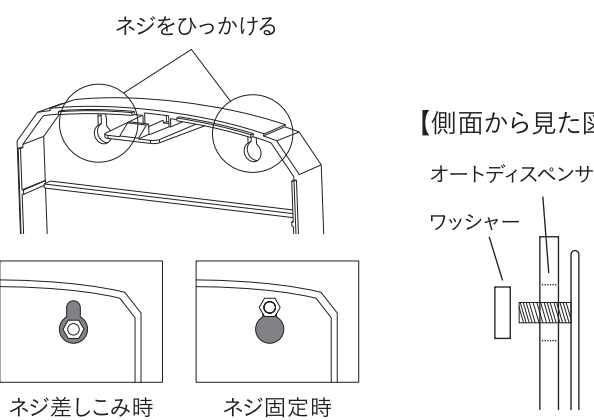

- ①上の図を参考に、粘着シールについているネジの頭をオートディスペンサーの大きい穴に差しこみます。
- ②①で外したナットをネジの頭にはめて、指で軽く締めつけます。
- ③ディスペンサーを下にずらすと、上の狭い穴にネジがはまります。
- ④ボトルのツメが手前側、ノズルを下側にした状態でボトルを再びディスペンサーに収納します。
- ⑤カバーを元に戻します。


2 除菌液用ボトルを取り外し、受け皿を取り付ける

【ディスペンサー裏側】

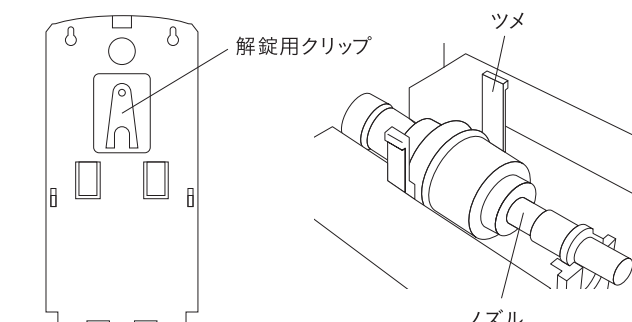

- ①ディスペンサー裏側の「解錠用クリップ」を取り外します。
- ②『■カバーの開け方』を参考に、外側のカバーを開きます。
- ③ツメ2ヶ所の根本をしっかりと親指と人差し指で挟みます。もう片方の手をノズルの裏側にひっかけて上に引き上げ、ボトルを取り外します。
- ④『■オートディスペンサー各部の名称』に記載の『受け皿の取り付け』を参考に、ディスペンサーに受け皿を取り付けます。

4 電力供給プラグを挿入する

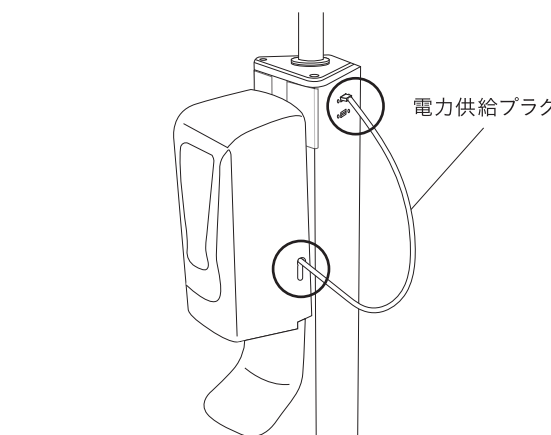

- ①付属の電力供給プラグを、図のように挿入してください。
- ②ディスペンサー側面にある電源スイッチを、ONにします。(サーモエントランスの電力をディスペンサーに供給することができるようになります、乾電池を入れずにそのままご使用いただけます。)

《注意》本製品は乾電池もしくは電力供給プラグをご使用いただくことで作動します。ご使用状況によって好きな方法をお選びください。

④ 完成



■サーモエントランスの使用方法

同梱の取扱説明書をご確認ください。

■オートディスペンサーの使用方法

ご使用の際は、ディスペンサー側面にあるスイッチをONにします。手をかざすとセンサーが反応して、噴射ノズルからアルコールが噴射されます。

センサーランプ

センサー検知可能距離:8~12cm

【センサーランプの状態】

緑のランプが5秒点滅 → 起動中
赤いランプが5秒点滅 → 電力低下・電池交換のサイン
赤いランプが2秒点滅 → センサーの下にあるものを取り除いてください。

※ 本製品はジェルタイプやソープタイプの消毒液はご利用いただけません。

■使用上の注意点

- ディスペンサー本体を強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損する恐れがあります。
- 直射日光、高温多湿の場所は避けて使用してください。
- 火気・熱源のあるものの近くには設置しないでください。
- 製品に異常が発生した場合はすぐにご使用を中止してください。
- 製品のボトルにはアルコール液以外のものは入れないでください。故障の原因となります。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- 乾電池ご使用、電力供給プラグご使用に関わらず、長期間使用しない場合は電源をこまめにお切りください。